



ASSEMBLAGE DU CHARIOT


Pièces incluses pour l'assemblage du chariot :

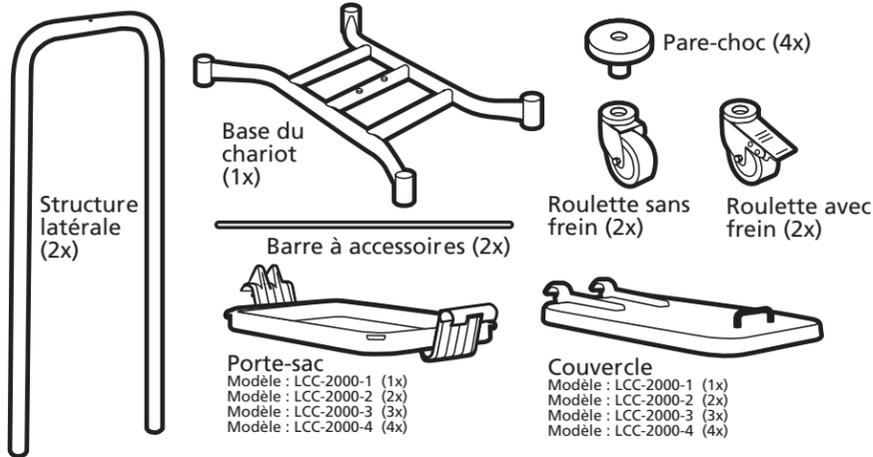


1. Étalez la boîte de carton ouverte sur le plancher. Elle vous servira de tapis protecteur. Retirez l'emballage qui recouvre les différentes pièces.
2. Glissez les pare-chocs sur les structures latérales.
3. Insérez les structures latérales dans la base du chariot. Veuillez vous assurer que les trous pour insérer la barre à accessoires soit dirigés vers l'intérieur.
4. Pour insérer la barre à accessoires, écartez les structures latérales et insérez dans les trous une extrémité à la fois.

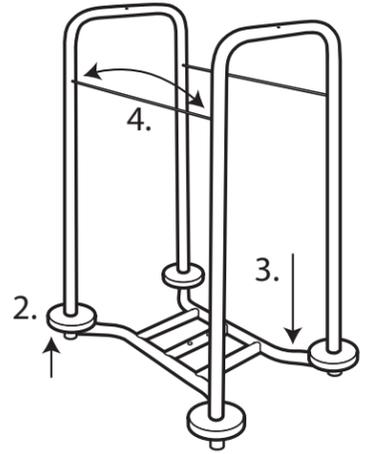

2. 1. Renversez la structure. Assurez-vous que les structures latérales soient bien insérées, mais qu'elles ne dépassent pas la base du chariot.
2. Insérez la roulette dans le brancard. Poussez fermement ou tapez légèrement à l'aide d'un marteau. Deux roulettes ont des freins. Nous suggérons de les placer à l'avant.

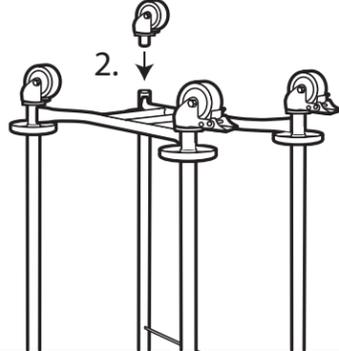


3. 1. Ramenez la structure à l'endroit.
 2. Pour installer les portes-sac, utilisez les trous sur les structures latérales, alignez les pointes sous les rebords et pressez fermement en place.
 3. Pour les chariots avec plus d'un porte-sac, assurez-vous que tous les butoirs soient du même côté.
 4. Pressez le(s) couvercle(s) en place. Les poignées doivent être à l'opposé des butoirs.
- NOTE : Si vous installez la pédale (le pédalier), ne pressez pas le couvercle en place jusqu'à l'indication plus bas.

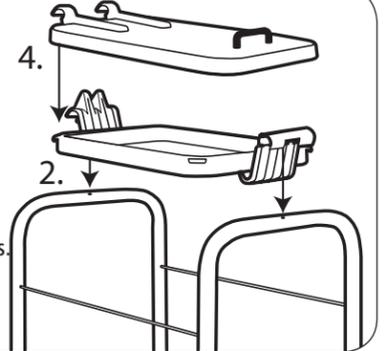

INSTALLATION DU PÉDALIER


Ce pédalier peut être installé sur tous nos chariots.

Pièces incluses pour l'assemblage du pédalier :

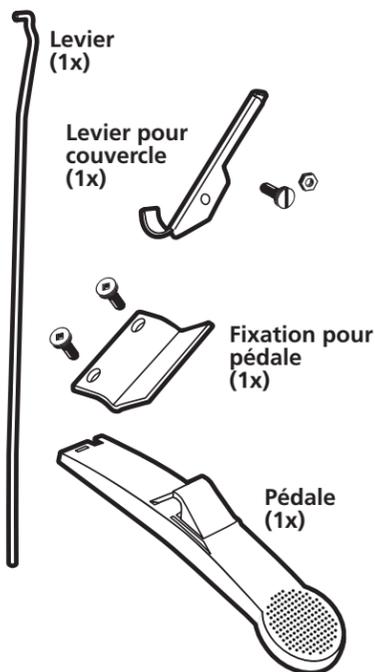


Outils nécessaires :
Perceuse avec mèche de 5/32 po (4 mm), stylo feutre, tournevis, paire de pince


1. Assemblez le chariot. N'installez pas les couvercles.

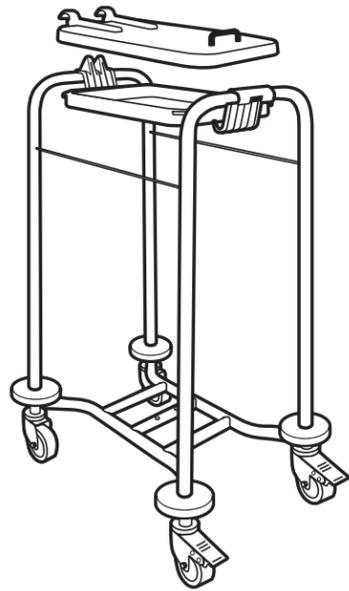


2. 1. Installez la base du levier dans la fente de la pédale. L'ajustement sera serré.
2. Le levier doit se lever de la façon indiquée.

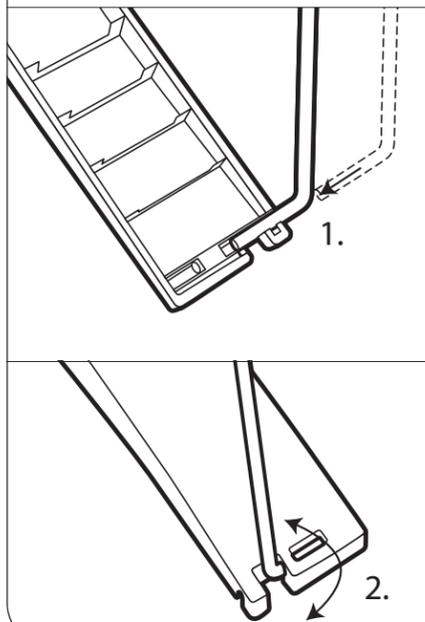

3. 1. Positionnez la pédale sous le chariot, entre les deux boulons d'ancrage. Installez-la sur la barre centrale de la base du chariot.
2. Assurez-vous que le levier soit du même côté que le butoir.

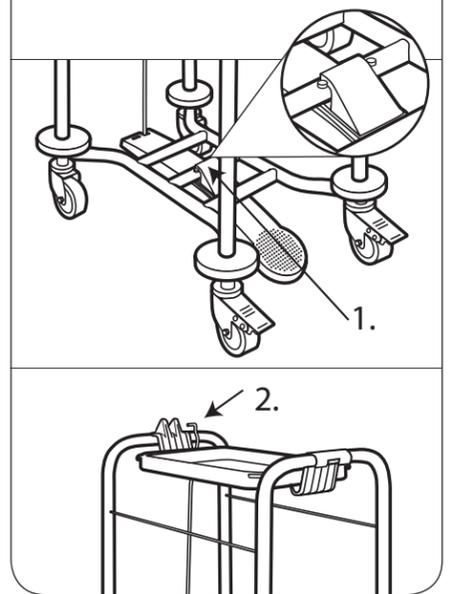


4. 1. Placez le levier pour couvercle sous la structure latérale près du porte-sac.
2. Insérez l'extrémité supérieure du levier dans le trou du levier pour couvercle.
3. Installez le couvercle par dessus le levier pour couvercle. Ramenez le levier au couvercle.

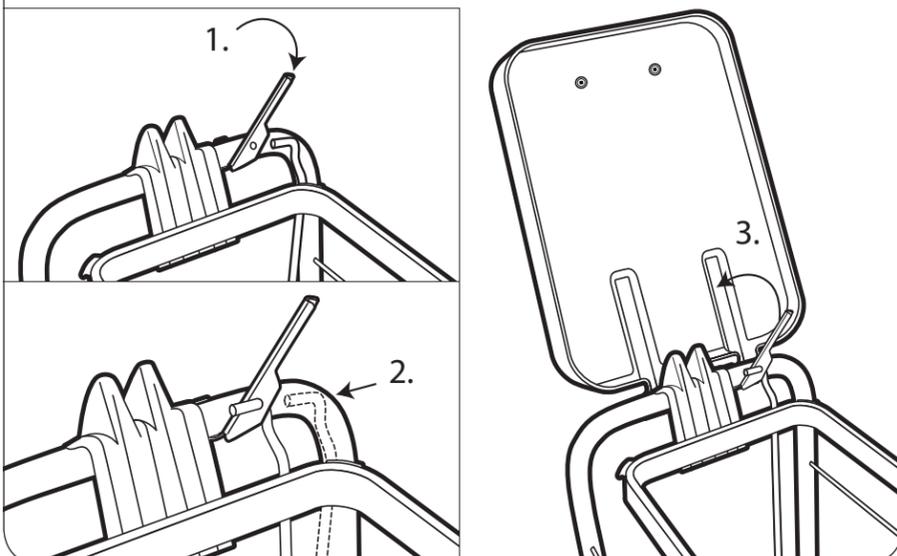


5. 1. Utilisez un stylo feutre pour indiquer l'endroit où vous devez percer. Éloignez le levier pour couvercle afin de percer plus facilement. Vous devez avoir une mèche de 5/32 po (4 mm) sur votre perceuse. Puis ramenez le levier au couvercle.

NOTE: Ne pas marquer les trous avec les couvercles enlevés. L'alignement pourrait être inexact.

2. Poussez la vis à travers le couvercle et le levier pour couvercle, vissez l'écrou. En retenant l'écrou avec une pince, serrez la vis à l'aide du tournevis.

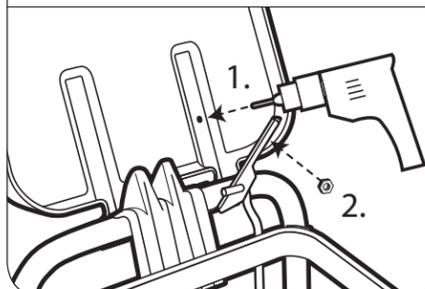

6. 1. Positionnez la fixation pour pédale à l'endroit encastré. Installez à l'aide de deux vis. Serrez uniquement pour que les vis pénètrent le plastique, si vous serrez trop vous pourriez endommager le plastique.

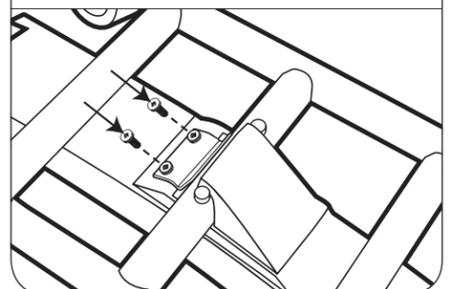

Aussi disponibles : Anneau d'arrêt pour les sacs.